

Manual de Instruções

UltraCleaner 700



As instruções que você terá a seguir são importantes para um bom funcionamento de sua Lavadora Ultra-Sônica Unique. Leia com atenção e garanta a durabilidade de seu patrimônio.

Instalação

Este equipamento pode ser instalado seguramente pelo próprio cliente, sem comprometimento algum da garantia, desde que as instruções aqui contidas sejam seguidas a risca.

IMPORTANTE:

Verifique atentamente a etiqueta de identificação do Aparelho e assegure que a instalação elétrica (tomada), corresponde com as especificadas.

Equipamento com seleção automática de voltagem 110 ou 220V.



Preparo e Utilização



1 - Coloque as peças dentro do cesto plástico



2 - Logo em seguida coloque o cesto com as peças, dentro da cuba.



3 - Verifique junto ao fabricante do líquido de limpeza qual a exata proporção de mistura.
- Após a mistura, coloque o líquido dentro da cuba até o nível indicado.

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente

sac@unique.ind.br - www.unique.ind.br

Tel: (19) 3935-2443

Unique Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Turquesa, 215 - 13347-070 - Indaiatuba - SP
Fone/Fax: (19) 3935-2443
CNPJ: 01.879.440/0001-23 - Registro Anvisa: 80023760001
Responsável Técnico: Sergio Luis de Oliveira - CREA N° 5060194622



Certificado de Garantia

A presente garantia é válida por 1 ano contado a partir da data de emissão da nota fiscal. Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso), substituídos sem cobrança do valor da mão de obra de conserto ou da peça substituída.

A nossa assistência técnica é permanente.

Os acessórios (cesto e tampa) têm garantia de 90 dias.

A presente garantia não cobre defeitos de:

- Uso inadequado do aparelho;
- Instalações elétricas fora do padrão ABNT/NBR5410;
- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada;
- Estocagem incorreta, influência do clima, ambiente impróprio;
- Não cumprimento das instruções dadas nesse manual que acompanha o aparelho;
- Utilização de peças de fabricação de terceiros;

Cessa a garantia imediatamente:

- Quando constatado que o aparelho foi manipulado por terceiros.
- Quando constatado que as recomendações feitas nesse manual não foram seguidas.

IMPORTANTE:

A garantia só é válida mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido.

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
Nota Fiscal: _____

Número de Série: _____

Nome/Empresa: _____

Data: _____

Carimbo do Revendedor



Ajustando o Temporizador




Quando piscando, indica o tempo máximo de limpeza.

Tecla liga/desliga e Ajuste. Pressione para ajustar, ativar ou desativar o tempo de limpeza.

Quando piscando, indica o tempo mínimo de limpeza.

- Certifique-se se o cabo de força do aparelho está ligado à rede elétrica.
- Pressione a Tecla liga/desliga por 2 segundos para ajustar entre o tempo mínimo ou máximo de limpeza.



- Tempo mínimo 05 minutos. 
- Tempo máximo 10 minutos.

- Pressione novamente a tecla para ativar a limpeza.

- Neste instante o led do tempo selecionado piscará indicando que o aparelho encontra-se em funcionamento.

- Após o ciclo de limpeza o Led para de piscar e permanece aceso, indicando que o aparelho encontra-se em "Stand-By" (repouso).

Esclarecimentos Importantes

Ruído:

É normal desde que se apresente de maneira uniforme. A intensidade do ruído pode variar por diversos fatores tais como: Viscosidade da solução, temperatura, quantidade de peças imersas e nível da água.

Aquecimento:

Ocorrerá se o aparelho funcionar por várias horas consecutivas.

Fusível:

É fixado na parte de trás do aparelho. Caso ocorra sua ruptura, há um fusível reserva dentro do porta-fusível.

Cesto Plástico:

Não utilizar soluções agressivas ou desengraxantes como BENZINA, GASOLINA, THINNER ou outros com o cesto Plástico. O Cesto é indicado para soluções detergentes neutras ou enzimáticas.

Problema x Solução

Meu aparelho está dando choque.

Verifique se a tomada onde o aparelho está ligado é devidamente aterrada. OBS: Nunca inutilize o Pino de Aterramento (Pino redondo) do cabo de força. Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica.

Pressiono a tecla liga/desliga e o aparelho não funciona.

Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica, o painel esteja aceso e ajuste o tempo desejado e pressione "Start" (tecla liga/desliga).

Meu aparelho parou de funcionar.

Verifique se não ocorreu a ruptura do fusível. Caso tenha rompido, proceda a troca do fusível. Há um reserva no porta fusível.

IMPORTANTE

Antes de enviar seu aparelho para manutenção, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para assegurar-se de que seu aparelho necessita realmente de manutenção.

Devido a constantes aprimoramentos técnicos realizados em nossos equipamentos, a Unique se reserva no direito de alterar seus equipamentos assim como seu material técnico/informativo, sem prévio aviso.